

＋ おしっこチェック 結果表



動物病院と一緒に
持って行ってにゃ!

猫ちゃんの名前

おしっこチェックの日
(おしっこを採った時間)

年 月 日 (時 分頃)

ビーズの状態

☐ 沈んだ

☐ 真ん中を漂っている

☐ 浮いた



おしっこの色

☐ いつも通り

☐ いつもより薄い

☐ いつもより濃い

おしっこトレー
色見本の番号 番

おしっこの量

☐ いつも通り

☐ いつもより多い

☐ いつもより少ない

猫ちゃんのごはん

☐ ほとんどドライフード

☐ 主にドライフード

☐ ほとんどウェットフード

☐ 主にウェットフード

猫ちゃんの食欲

☐ いつも通り

☐ いつもよりある

☐ いつもよりない

猫ちゃんの飲水量

☐ いつも通り

☐ いつもより多い

☐ いつもより少ない

おしっこチェック および 動物病院に持参する場合の注意

- おしっこの後、できるだけ早めにおしっこを吸い取り、ビーズの動きを確認することをおすすめします(おしっこ後1時間以内が目安)。
- 採ったおしっこを動物病院に持ち込む場合、おしっこの成分が変化する恐れがあるので、なるべく早めにご持参することをおすすめします(猫ちゃんがおしっこをしてから、おしっこ比重チェッカーのキャップをしっかりと閉めた状態で、常温なら3時間、冷蔵の場合は6時間以内が目安です)。
- おしっこが入ったおしっこ比重チェッカーを持ち運ぶ場合は、キャップをしっかりと閉めてください。おしっこがもれる恐れがあります。
- おしっこを持参する場合は、事前に獣医師にご相談することをおすすめします。

商品に関するお問合せ・ご意見は

花王 消費者相談室 ☎0120-165-696

9:00～17:00(土・日・祝日は除く) 受付時間は変更になる場合があります

花王株式会社

〒103-8210 東京都中央区日本橋茅場町1-14-10

www.kao.com/jp/nyantomoto/index.html

Made in Japan 「ニャンとも」は花王の商標です



花王「ニャンとも」WEBサイト
愛猫との暮らしに
役立つ情報はこちら



ご使用前に必ずお読みください

定期的なチェック
おしっこの変化を早期発見! KAO

花王の
ニャンとも
清潔トイレ

猫ちゃん思い設計

おしっこチェックキット

Guide Book

3ヶ月に1度を目安に、定期的なおしっこチェックをおすすめします

＼使う前に見てみよう!／
おしっこチェックキットの
使い方アドバイス

猫ちゃんのおしっこチェックお役立ち情報も!



セット内容／1回分



おしっこ比重
チェッカー
【ビーズ1個入・キャップ付き】



おしっこトレー
【1セット(2枚)】



汚れ防止用
ニャンとも清潔トイレ
脱臭・抗菌シート【1枚】

別途ご用意ください

システム
トイレ用
チップ



POINT

ニャンとも清潔トイレの
チップは、通過したおしっこ
の成分に影響を与えません

おしっこチェックキット 使用方法

- 本品は猫の尿比重を簡易的にチェックするものです。猫の疾患や症状を診断、治療するものではありません。
- 本品を使用される環境や猫の状態により、ビーズの動きが変わる場合があります。

1 付属のシートと、新しいチップをトイレにセットしてください



シートをトイレに設置




新しいチップに交換

汚れたチップを使用すると、ビーズの動きに影響が出る恐れがあります。

POINT チップを全て交換するのが難しい場合は、猫ちゃんがおしっこする箇所に新しいチップを入れるなど、汚れたチップにおしっこがかからないようにしてください。

2 シートの上に付属のおしっこトレーを2枚並べて置いてください

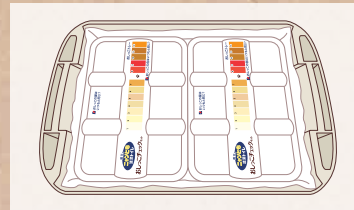

POINT 子猫用、ニャンとも以外のトイレなどで、おしっこトレーを2枚置けない場合は、シート中央、または猫ちゃんがいつもおしっこする位置に1枚設置してください。

3 引き出し*をシステムトイレに戻して準備完了




おしっこトレーがズレないように、引き出し*はゆっくり戻してください。

*引き出し式トイレの場合(引き出し式トイレ以外にも使えます)



準備ができたら、猫ちゃんがおしっこをするのを待ちましょう。

4 付属のおしっこ比重チェッカーで、おしっこを吸い取ってください

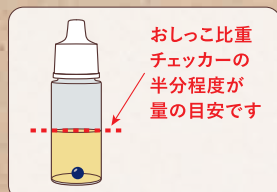

おしっこ比重チェッカーの半分程度が量の目安です

- おしっこがこぼれないよう、引き出し*はゆっくり引き出してください。
- おしっこ比重チェッカーの真ん中部分を押し込んで、先に空気を抜いておくとおしっこが吸い取りやすいです。
- ビーズが吸い口につまった状態で、おしっこ比重チェッカーを強く押し込むと吸い口が外れる恐れがあるのでご注意ください。
- おしっこの後、できるだけ早めにおしっこを吸い取り、ビーズの動きを確認することをおすすめします(おしっこ後1時間以内が目安です)。キャップはすぐに閉めてください。

POINT 1度使用したおしっこ比重チェッカーを再使用しないでください(ビーズの動きに影響が出る恐れがあります)。

5 おしっこ比重チェッカーのビーズの動きを確認してください

【ビーズの位置はどうですか?】

ビーズが沈んでいる

✓ 薄めのおしっこです。

ビーズが真ん中を漂っている

✓ やや薄めのおしっこです。

ビーズが浮いている

✓ 良好な濃さ～濃いめのおしっこです。

● 加齢などでおしっこを濃くする機能が変化すると、おしっこが薄めになることがあります。

● ビーズの動きが安定するのに時間がかかることがあります。おしっこを採ってキャップをした後、おしっこ比重チェッカーの上下を何度か反転し、ビーズとおしっこをなじませてからビーズの動きをご確認ください。

ただし、「濁っている」「ピンク色をしている」「キラキラ光る結晶が混じっている」などのときは注意が必要です。

POINT 3ヶ月に1度を目安としたチェックで、おしっこの濃さ(いつもより薄め/濃いめ)の変化に気づいてあげることが大切です。

6 おしっこの色・量もチェックしましょう

おしっこトレーのカラーチャートと比較

✓ おしっこの色はいつもと同じ?

おしっこトレーにたまった量を確認

✓ おしっこの量はいつもと同じ?



採ったおしっこを動物病院へ持ち込む場合

- おしっこの成分が変化する恐れがあるので、なるべく早めにご持参することをおすすめします(猫ちゃんがおしっこをしてから、おしっこ比重チェッカーのキャップをしっかりと閉めた状態で、常温なら3時間、冷蔵の場合は6時間以内が目安です)。
- おしっこを持参する場合は、事前に獣医師にご相談することをおすすめします。

おしっこチェックが終わったら

- おしっこトレーに残ったおしっこはシートに吸収させてください。シートはそのまま約1週間お使いいただけます(愛猫1頭で使用する場合)。

POINT いつもと違うと感じた場合は、獣医師へのご相談をおすすめします。

